



G-1
Bez potřeby kofferdamu,
lze použít vatové čtverečky
nebo válečky.

G-2
Bez potřeby kofferdamu,
lze použít vatové čtverečky
nebo válečky.

P-1
Pro dětské
první moláry.

P-2
Pro dětské
první moláry.

12A



Pro třetí moláry
se zoubkovanými
čelistmi.

13A



Pro třetí moláry
se zoubkovanými
čelistmi.

138




Pro třetí moláry,
v páru se sponou
č. 139.

139



Pro třetí moláry,
v páru se sponou
č. 139.

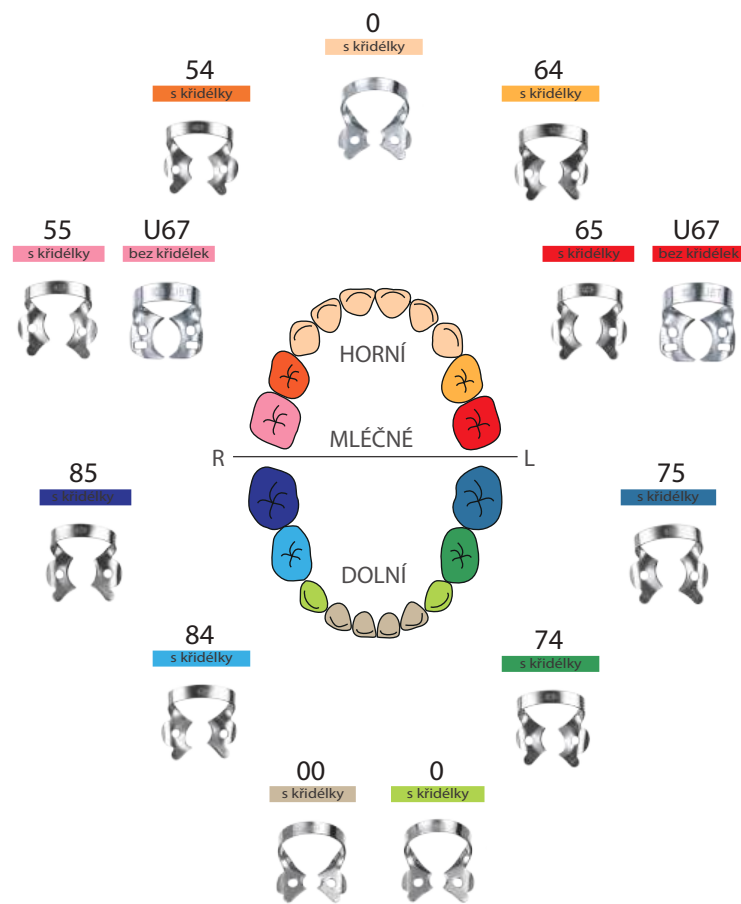

Kofferdámový set č. 8

Nerezová ocel
Velikost : 90 x 90mm

Podložka s 8 sponami: 9 x 2, 2A,
W2A, 5, 56, 203 & 204
nebo
organizér na 8 spon (pouze podložka)

Vyrobeno v Japonsku



Kofferdámový set č.12

Nerezová ocel
Velikost : 150 x 90mm

Podložka s 12 sponami: 210, 9, 0, 2,
2A, 206, 207, 5, 56, 7, 201 & 202
nebo
organizér na 12 spon (pouze podložka)

Vyrobeno v Japonsku



Kofferdámový set č.18

Nerezová ocel
Velikost : 160 x 120mm

Podložka s 12 sponami: 210, 9, P-1,
P-2, 22, 27, 29, 208, 209, 18, 138, 139,
7, 201, 202, 203, 204 & 205
nebo
organizér na 18 spon (pouze podložka)

Vyrobeno v Japonsku



Dětský kofferdamový set

Nerezová ocel
Velikost : 90 x 90mm

#54-pravá horní D #64-levá horníD
#55-pravá horní E #65-levá horní E
#85-pravá dolní E #75-levá dolní E
#84-pravá dolní D #74-levá dolní D
nebo
organizér na 18 spon
(pouze podložka)

DENTECH CORPORATION
TEL:+81-3-3964-2011 FAX:+81-3-3962-5624
Web: www.dentech.co.jp Email: info@dentech.co.jp
53-5, Shimizu-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0053, JAPAN

DentaMAX
All-Max Made s.r.o.
Čeladná 679, 739 12
www.dentamax.cz info@dentamax.cz
tel.: +420 777 244 005



Průvodce výběrem

KSK

kofferdámových spon

LESKLÉ



ČERNÉ



MATNÉ



76 typů × 3 barvy

Proč si vybrat právě KSK Dentech spony

- ✓ KSK DENTECH kofferdámové spony jsou vyrobeny ze speciální pružinově kalené nerezové oceli.
- ✓ Tento materiál má ideální pružnost pro spony pro kofferdam a zároveň zajišťuje maximální odolnost proti korozi.
- ✓ K dispozici je široká škála typů, takže si snadno vyberete spony přesně podle tvaru a umístění zubů.
- ✓ Spony procházejí přísnou kontrolou kvality včetně testu únavy kovu, který zaručuje optimální pružnost a dlouhou životnost.
- ✓ Pro dosažení absolutní stability a dokonalého tvaru jsou naše spony pečlivě a precizně ručně upravovány.
- ✓ Všechny čelisti jsou precizně ostřeny, aby se dokonale přizpůsobily zubům.
- ✓ Černé a matné provedení výrazně snižuje odlesky světla, chrání oči lékařů a je ideální pro fotografování.
- ✓ Všechny spony jsou vyrobeny v Japonsku.


Kompletní kofferdámový set



Obsah :
① Kofferdámový set č.12
② Kofferdámový rámeček
③ KSK perforační kleště
④ KSK aplikační kleště
& Sterilizační kazeta

Kofferdam Starter Kit

Contents :
① Cofferdámový set č.12
② Kofferdámový rámeček
③ KSK perforační kleště
④ KSK aplikační kleště
⑤ Kofferdámová šablona
⑥ KSK Dental Dam Non-Latex (20 kusů).

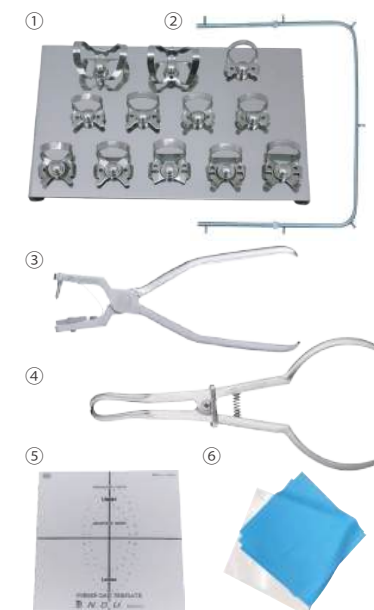

42 43
bez křidélek



Pro horní
levé moláry
s plochými
čelistmi v páru
se sponou
č. 43.

Pro horní
levé moláry
s plochými
čelistmi v páru
se sponou
č. 42.

9T 2A 2AT
s křidélek



Oblíbená
spona pro
frontální
úsek.

Podobná
sponě č. 2,
s většími
čelistmi pro
premoláry.

Podobná
sponě č. 2T
s většími
čelistmi pro
premoláry.

44 212 29
bez křidélek



Pro frontální
úsek, špičky
a kavity na
labiální ploše
premolárů.

Krčková spona
pro ošetření
labiálních kazů.

Pro horní a dolní
premoláry, široké
čelisti pro lepší
přehled.

9T 210 212 90N
s křidélek bez křidélek



Oblíbená spona
pro frontální
úsek.

Spona pro
řezáky.

Krčková spona
pro ošetření
labiálních kazů.

Rigidní spona
pro frontální
úsek.

6 9 44 212SA
s křidélek bez křidélek



Spona pro
frontální úsek.

Oblíbená spona
pro frontální
úsek.

Pro frontální
úsek, špičky
a kavity na
labiální ploše
premolárů.

Podobná č. 212
s větším přitlakem
na gingivu.

4 205 5 8A 201 14 14T 51 26 W8A U67 18
s křidélek bez křidélek



Podobná
sponě č. 3, ale
se zanořenými
čelistmi.

Rigidní spona
pro horní
moláry.

Spona
pro horní
moláry.

Spona pro
horní moláry
s velmi zano-
řenými čelistmi.

Podobná
sponě č. 7, ale
se zanořenými
čelistmi.

Spona pro
částečně
prořezané
moláry.

Spona pro
částečně
prořezané
moláry.


Spona do
furkací kořene,
zároveň stla-
čuje dásně.

Spona pro
prořezané
horní moláry.

Podobná
sponě 8A,
ale bez
křidélek.

Určeno pro
horní druhé
moláry –
kompaktní
provedení.

Spona pro horní a
dolní moláry se
zaoblenými
čelistmi pro
krčkovou oblast.

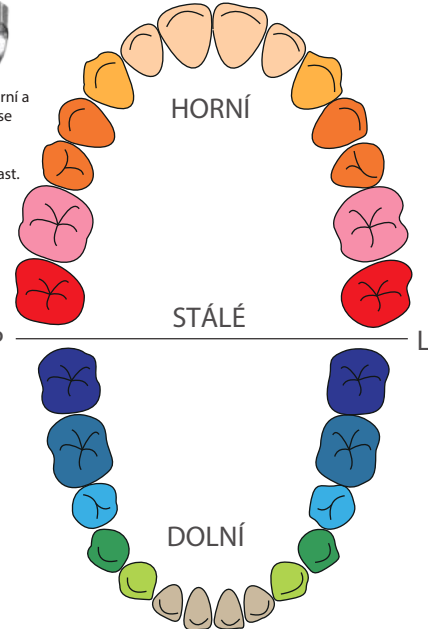

DISTAL 56T 14T 3 51 31 30 25 W8A 18
s křidélek bez křidélek



Spona pro
moláry s
přístupem k
distální části.

Spona pro
dolní moláry
se zanořenými
čelistmi.

Spona pro
malé moláry
s rovnými
čelistmi.

Spona pro
malé moláry
s rovnými
čelistmi.

Spona do
furkací kořene,
zároveň stla-
čuje dásně.

Spony pro moláry s výrazným
hrbolkem do furkace v
subgingivální oblasti. Spony
č. 30 a č. 31 jsou v páru.

Pro hluboké
bukální kavity
molárů. Se širším
okrajem na
bukální straně.
v páru s č. 24.

Podobná
sponě 8A,
ale bez
křidélek.

Spona pro horní a
dolní moláry se
zaoblenými
čelistmi pro
krčkovou oblast.

1 1T 1A 1AT 22 27 W2A 203 204 202 201
s křidélek bez křidélek s křidélek



Spona pro
kořeny s
hluboce
zanořenými
čelistmi.

Spona pro
kořeny se
zanořenými
čelistmi se
zoubky

Spona pro
krčkové kavity
premolárů se
zanořenými
čelistmi.

Spona pro
subgingivální
kazy v oblasti
premolárů.

Podobná
sponě č. 207,
bez křidélek.

Podobná
sponě č. 206,
bez křidélek a
se zanořenými
čelistmi.

Podobná
sponě č. 2A,
bez křidélek.

Pro malé
spodní moláry,
v páru se
sponou
č. 204

Pro malé
spodní moláry,
v páru se
sponou
č. 203

Podobná
sponě č. 7, ale
s většími
čelistmi. Pro
velké moláry.

Podobná
sponě č. 7, ale
se zanořenými
čelistmi.

207 208 2A 2AT
s křidélek



Pro horní a
dolní premo-
láry s rovnými
čelistmi.

Pro velké
premoláry s
větším
okrajem než
spona č. 207.

Podobná
sponě č. 2,
s většími
čelistmi pro
premoláry.

Podobná
sponě č. 2T
s většími
čelistmi pro
premoláry.

9T 2 2T 212 22 44
s křidélek bez křidélek



Oblíbená
spona pro
frontální
úsek.

Pro dolní
premoláry
s plochými
čelistmi.

Pro dolní
premoláry s
plochými
čelistmi se
zoubky.

Krčková spona
pro ošetření
labiálních kazů.

Podobná
sponě č. 207,
bez křidélek.

Pro frontální
úsek, špičky
a kavity na
labiální ploše
premolárů.

9T 44 212
s křidélek bez křidélek



Oblíbená
spona pro
frontální
úsek.

Pro frontální
úsek, špičky
a kavity na
labiální ploše
premolárů.

Krčková spona
pro ošetření
labiálních kazů.

208 207 206 1T 22 27 29 Y10
s křidélek bez křidélek



Pro velké
premoláry s
větším
okrajem než
spona č. 207.

Pro horní a
dolní
premoláry
s rovnými
čelistmi.

Spona pro
horní a dolní
premoláry s
vyklenutými
čelistmi.

Spona pro
kořeny se
zanořenými
čelistmi se
zoubky

Podobná
sponě č. 207,
bez křidélek.

Podobná
sponě č. 206,
bez křidélek a
se zanořenými
čelistmi.

Pro horní a
dolní premo-
láry s širokými
čelistmi pro
lepší přehled.

Pro premoláry
s hluboce
zanořenými
čelistmi, které
se zachycují
pod dásni.

205 5 8A 201 14A 4 8 28 24 42 43
s křidélek bez křidélek



Rigidní spona
pro horní
moláry.

Spona
pro horní
moláry.

Spona pro
horní moláry
s velmi zano-
řenými čelistmi.

Podobná
sponě č. 7, ale
se zanořenými
čelistmi.

Podobná
sponě č. 14
s většími
čelistmi.

Podobná
sponě č. 3, ale
se zanořenými
čelistmi.

Pro horní
moláry se
zanořenými
čelistmi stejně
velká jako č. 7.

Pro horní a
dolní moláry
s širokým
okrajem.

Pro hluboké
bukální kavity
molárů se širším
okrajem na
bukální straně.
v páru s č. 24.

Pro horní
levé moláry
s plochými
čelistmi v páru
se sponou
č. 43.

Pro horní
levé moláry
s plochými
čelistmi v páru
se sponou
č. 42.

202 14 56 7 W3 31 30 28 25 15
s křidélek bez křidélek



Podobná
sponě č. 7, ale
s většími
čelistmi. Pro
velké moláry.

Spona pro
částečně
prořezané
moláry.

Podobná
sponě č. 5, se
zanořenými
čelistmi.

Pro dolní
moláry s
rovnými
čelistmi.

Podobná
sponě č. 3,
ale bez
křidélek.

Spony pro moláry s výrazným
hrbolkem do furkace v
subgingivální oblasti. Spony
č. 30 a č. 31 jsou v páru.

Pro horní a
dolní moláry.
S širokým
okrajem.

Pro hluboké
bukální kavity
molárů. Se širším
okrajem na
bukální straně.
V páru s č. 24.

Rigidní spona
pro moláry s
dlouhými
čelistmi.

7A 14A 56A 14T 56T 2T 2A 2AT 1 1T 1A 1AT
s křidélek s křidélek



Pro velké
dolní moláry
s plochými
čelistmi.

Podobná
sponě č. 14
s většími
čelistmi.

Pro velké
spodní moláry.
Podobná č. 56,
s většími
čelistmi.

Spona pro
částečně
prořezané
moláry.

Spona pro
dolní moláry
se zanořenými
čelistmi.

Pro dolní
premoláry s
plochými
čelistmi se
zoubky.

Podobná
sponě č. 2,
s většími
čelistmi pro
premoláry.

Podobná
sponě č. 2T
s většími
čelistmi pro
premoláry.

Spona pro
kořeny s
hluboce
zanořenými
čelistmi.

Spona pro
kořeny se
zanořenými
čelistmi se
zoubky

Spona pro
krčkové kavity
premolárů se
zanořenými
čelistmi.

Spona pro
subgingivální
kazy v oblasti
premolárů.

29 22 27 W2A Y10 207 209 0 00
bez křidélek s křidélek



Pro horní a
dolní premo-
láry s širokými
čelistmi pro
lepší přehled.

Podobná
sponě č. 207,
bez křidélek.

Podobná
sponě č. 20,
bez křidélek a
se zanořenými
čelistmi.

Podobná
sponě č. 2A,
bez křidélek.

Pro premoláry
s velmi
zanořenými
čelistmi, které
se zachycují
pod dásni.

Pro horní a
dolní premo-
láry s rovnými
čelistmi.

Pro dolní
premoláry s
plochými
čelistmi.

Pro malé
premoláry
a dětské
řezáky.

Menší než
spona č. 0.
Pro frontální
úsek.